

 **BEAUTFUL**

ULTRASONIDO FOCALIZADO DE ALTA INTENSIDAD



**EL EQUIPO MÁS EFECTIVO Y SEGURO
QUE TRANSFORMARÁ TU ROSTRO Y TU CUERPO**

 **LASERLUZ**

Rejuvenecimiento y tensado de la piel efecto lifting

Reafirmación y remodelación del óvalo facial

Eliminación de la grasa localizada

Remodelación y reafirmación del contorno corporal


¿QUÉ ES BEAUTFIFUL?

Beauthiful es un equipo de última generación basado en la tecnología **HIFU**, que es la abreviatura de **High-Intensity Focused Ultrasound** (ultrasonido focalizado de alta intensidad).

Este ultrasonido, por su enfoque a modo “de lupa”, consigue generar puntos concretos a temperaturas muy altas en cada zona seleccionada. Por las características de este sonido se consigue una alta penetración, precisa y controlada, incidiendo en determinadas células y proteínas sin dañar otras estructuras.

En los **tratamientos de reafirmación y rejuvenecimiento** la desnaturalización de proteínas por la concentración en alta intensidad ultrasónica (también conocido como Vibración Biomolecular) consigue llegar al interior del tejido con una elevación de temperatura superior a 65°C. Esto provoca la retracción inmediata del tejido, produciendo un efecto tensor que, gracias a la estimulación natural de los fibroblastos, permite mantener el efecto de reafirmación durante un largo periodo de tiempo.

En los **tratamientos de reducción**, el **HIFU** produce un efecto termo mecánico que se encarga de destruir el tejido graso a nivel subcutáneo, pero sin dañar ni los tejidos adyacentes ni la epidermis. La grasa comienza a deshacerse y se elimina de forma natural a través del organismo por el sistema linfático y las vías urinarias.

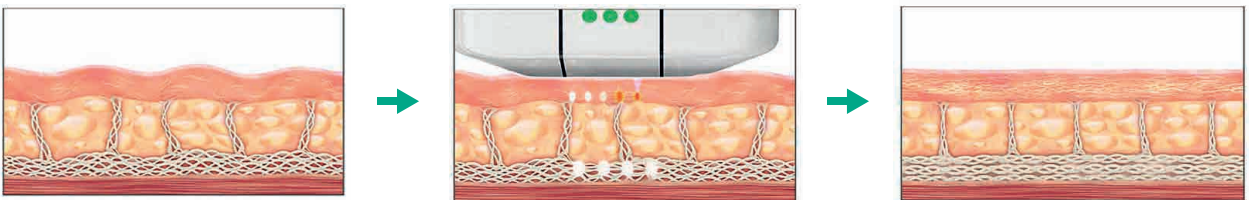

ASÍ ACTÚA

A **nivel facial Beautiful** crea zonas de coagulación térmica a 1,5 mm, 3 mm y 4,5 mm de profundidad con una precisión geométrica mientras mantiene al margen y controlada la epidermis. Esta fuerza activará la neocolagénesis (estimulación del colágeno). El nuevo colágeno se compacta gradualmente desde la zona más profunda (el interior) hasta la zona superficial, restaurando la elasticidad y tersura de la piel con el fin de lograr el efecto de disipar las arrugas (Antiaging).

A **nivel corporal Beautiful** consigue efectos mecánicos y térmicos que perforan selectivamente el adipocito, manteniendo intactas las estructuras circundantes y dejando espacio para que los ácidos grasos puedan salir, en parte gracias al aumento de la temperatura que además nos ayuda a mejorar la reafirmación de la piel. La penetración va desde 6 mm hasta los 16 mm en función del área y el inestetismo a tratar.

El Ultrasonido **Beautiful** permite realizar tratamientos faciales y corporales de forma rápida y eficaz con unos resultados permanentes.



TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

En los tratamientos faciales se realizará como máximo una sesión cada 4-6 meses aunque el profesional deberá realizar un seguimiento de los resultados y valorar si es necesaria una nueva sesión.

Los tratamientos corporales se realizarán una vez al mes de manera habitual.

Un **tratamiento facial** completo oscila entre 50 y 60 minutos.

Un **tratamiento corporal** oscila entre 30 y 90 minutos, en función de la zona a tratar.

Una vez finalizada la sesión, el cliente puede realizar su actividad cotidiana.

PASO A PASO HIFU FACIAL



1.- Limpiar y tonificar el área de tratamiento.



2.- Delimitar y dibujar la zona de trabajo con lápiz blanco.



3.- Aplicar gel conductor (2 mm aproximadamente).



4.- Elegir el cartucho adecuado en función de la zona a trabajar.



5.- Aplicar mascarilla calmante con una brocha y dejar actuar durante el tiempo recomendado.



6.- Retirar la mascarilla y finalizar con una crema específica.

PASO A PASO HIFU CORPORAL



1.- Marcar y delimitar la zona de tratamiento con lápiz blanco.



2.- Aplicar gel conductor (2mm aproximadamente).



3.- Elegir el cartucho adecuado en función de la zona a trabajar.



4.- Finalizar con una crema específica y, si es necesario, continuar con un tratamiento de presoterapia.



BEAUTFIFUL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ultrasonido focalizado de Alta Intensidad | 11 líneas de trabajo simultáneo | Facial y corporal
Transductores: 3 faciales (DS7-1.5, DS7-3.0, DS7-4.5); 5 corporales (DS7-6.0, DS7-8.0, DS7-10.0, DS7-13.0, DS7-16.0) | Densidad de energía: 0,2-2J/cm | Frecuencia: 4MHz
Logitud máx. de línea de disparo: 5~25mm | Superficie máx. de tratamiento: 25mm
Vol. máx. de tratamiento: 4 cm | Peso: 11Kg | Dimensiones: 40 x 44 x 40cm

NORMATIVAS CE

EN 60335-1: 2012+A11: 2014 | UNE-EN 55014-1: 2017/A11: 2021 | UNE-EN 55014-2: 2015



LASERLUZ

Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

900 902 792

laserluz@laserluz.com

www.laserluz.com

 [@laserluzestetica](https://www.instagram.com/laserluzestetica)

 [Laserluz Technology](https://www.facebook.com/LaserluzTechnology)

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)