

LIBERTEN

LÁSER LIPOLÍTICO ADELGAZANTE



UN EQUIPO RÁPIDO Y EFICAZ
“MANOS LIBRES” PARA REDISEÑAR Y REMODELAR TU FIGURA

 LASERLUZ

Mejora de la celulitis
Pérdida localizada de volumen
Disminución de la grasa corporal
Modelación de la silueta
Piel más oxigenada y nutrida

¿QUÉ ES EL LIPOLÁSER?

Nuestro **Lipoláser** se basa en la combinación de placas de diodos de láser frío a baja intensidad y corrientes polares. Esta técnica favorece el vaciado de las grasas y genera un proceso que provoca la separación de la cadena de los tricéridos almacenados en ácidos grasos y glicerol.

Por otro lado, y gracias al incremento de la permeabilidad de la pared de adipocito, estas grasas se liberan a través de los poros en la membrana y se ponen en circulación a través del sistema sanguíneo y linfático para su posterior eliminación por vías urinarias y a través del propio ejercicio diario.



ASÍ ACTÚA

Liberten Lipoláser actúa emitiendo una energía que las células grasas van a absorber, y por ello se producirá:

- > Un incremento en la permeabilidad de las paredes del adipocito.
- > Un aumento del metabolismo celular.
- > La activación de la lisis por procesos enzimáticos naturales (lipasa), que va a convertir cadenas de ácidos grasos pesados (triglicéridos) en otros más ligeros (ácidos grasos y glicerol) que son consumidos por el organismo de forma natural.
- > La liberación del AMP cíclico intra-adipocitario que origina la degeneración de los triglicéridos.
- > La vasodilatación, por estímulo sobre los nervi-vasorum, que va a modificar el metabolismo de las células, permitiéndoles aumentar sus intercambios y mejorar su nutrición.



TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

El tratamiento se realizará una vez a la semana, hasta completar un total de 10-12 sesiones con una duración de 10 minutos por zona, pudiendo realizarse hasta un máximo de tres zonas por sesión.



1. Calentamos la zona que vamos a trabajar con un masaje manual o con aparatología específica, como luvenis Radiofrequency.



2. Seleccionamos los parámetros adecuados en función de la zona a tratar y del grosor del tejido graso.



3. Situamos al cliente en la posición adecuada para el tratamiento, sin olvidar el uso obligatorio de gafas o parches específicos para el láser.



4. Colocamos las placas de diodos en la zona de tratamiento y dejamos que el equipo actúe de forma totalmente automática.



5. Pasados 10 minutos, retiramos las placas de diodos y, con un ligero masaje, aplicamos crema específica para el tratamiento.



6. Tras la sesión, en un plazo máximo de 72 horas, realizar un tratamiento de drenaje linfático manual o presoterapia.

Sistema manos libres que, en sólo 10 minutos y de forma eficaz e indolora, consigue modelar la silueta definitivamente.



LIBERTEN



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo: unipolar dermocontrolada + bipolar | Frecuencia de trabajo: 1-10MHz
Potencia de salida máxima: 260W | Diámetro del spot: 15mm x 2 /20mm x 2 /30mm x 2 /43mm
Pantalla táctil de 5,7" a color | Potencia de consumo máximo: 2400W
Alimentación: 220-240V~, 50Hz | Peso: 14Kg | Dimensiones: 40x40x15cm

NORMATIVAS CE

EN 60601-1-2:2007 | EN 60601-1:2006



LASERLUZ

Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

900 902 792

laserluz@laserluz.com

www.laserluz.com

 [@laserluzestetica](https://www.instagram.com/laserluzestetica)

 [Laserluz Technology](https://www.facebook.com/LaserluzTechnology)

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)