

# FACEHYDRA+

COMBINA LAS 4 TECNOLOGÍAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN  
PARA UNA PIEL RADIANTE Y LUMINOSA



 LASERLUZ

Limpieza e hidratación intensiva  
Reducción de poros y acné  
Mejora de la textura de la piel  
Reducción de líneas finas y arrugas  
Rejuvenecimiento



# ¿QUÉ ES FACEHYDRA+?

**FACEHYDRA +** es el equipo de vanguardia diseñado para revolucionar los tratamientos faciales. Combina múltiples funciones en un sólo equipo, ofreciendo una experiencia completa del cuidado facial, teniendo como objetivo tratar los inestetismos de tu piel.

Este equipo trabaja con cuatro tecnologías:

1. Aqua technology
2. Oxy technology
3. Radio technology
4. Ultrason technology

**FACEHYDRA+** es el indicado para realizar tratamientos para una limpieza profunda de la piel, hidratación, nutrición y oxigenación.

# ASÍ ACTÚA

1.



**Aqua Technology** está especialmente diseñado para actuar sobre la piel, eliminando células muertas y capa córnea. El movimiento en forma de remolino que realiza el cabezal, hace que el producto actúe, dando a tu piel una limpieza profunda, eliminando exceso de sebo y proporcionando nutrientes y máxima hidratación a tu piel.

2.



**Oxy Technology** es una tecnología inspirada en los spas de agua caliente. Las soluciones aplicadas en la superficie de la piel, reaccionan formando millones de microburbujas que oxigenan y nutren tu piel.

3.



**Radio Technology** ondas de radiofrecuencia para aumentar la temperatura, tensando las fibras de colágeno existentes y activando la creación de colágeno nuevo, consiguiendo una piel más firme y joven.

4.



**Ultrason Technology** ondas ultrasónicas que al entrar en contacto con la piel tiene un efecto directo en el tejido tisular, mejora la nutrición y oxigenación de los tejidos, activa la circulación venosa y la capacidad regenerativa de la piel.

FACEHYDRA+

# TRATAMIENTO Y PROTOCOLO

**FACEHYDRA +** nos permitirá trabajar sobre todo tipo de pieles. Su función principal es mejorar la apariencia de la piel, limpiando profundamente, eliminando impurezas e hidratando, proporcionando una piel más juvenil y saludable.

Para el tratamiento se recomienda realizar una sesión cada mes, con una duración de 1 hora aproximadamente. El profesional deberá realizar un seguimiento de los resultados y valorar si es necesaria una nueva sesión.

## PASO A PASO



1.- Aqua Technology: Limpiamos la zona con leche limpiadora y aplicamos tónico en rostro, cuello y escote. A continuación, con el manípulo de hidrodermoabrasión y las diferentes puntas, realizamos movimientos lentos y ascendentes.

2.- Oxy Technology: Este tratamiento cuenta con dos tipos de cápsulas; uno para aclarar la piel y otro para rejuvenecer. La combinación del gel con las capsulas, producirá CO2 en el área de tratamiento y aumentará la temperatura de la piel.

3.- Radio Technology: En esta fase, limpiamos la zona y seleccionamos los parámetros adecuados en función del cliente. Masajeamos suavemente la piel con movimientos circulares sin permanecer mucho tiempo en el área de tratamiento, asegurándose que el manípulo esté correctamente apoyado en la piel.

4.- Ultrason Technology: Introducimos la ampolla en el inyector y realizaremos movimientos circulares y ascendentes a lo largo del rostro. Repetiremos este movimiento hasta que el producto se absorba por completo. Finalizamos con mascarilla y crema hidratante.

**Facehydra+** hidrata, nutre, reafirma y mejora el aspecto de tu piel de forma rápida e indolora.

# FACEHYDRA+



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Modelo: EQ16 | Voltaje de entrada: 100VAC-230VAC 50Hz/60Hz | Potencia de entrada: 50VA**  
**Vibración: Frecuencia 3000r/min-5000r/min | Rango de energía 1-8,**  
**Tamaño de la partícula de la burbuja 10  $\mu$ m | Frecuencia de la generación de burbujas 1-3Hz**  
**Radiofrecuencia: Rango de energía 10-100 | Frecuencia 1MHz | Fuerza 10-15W**  
**Ultrasonido: Rango energía 10-100 | Frecuencia 1MHz | Fuerza 10-15W**  
**Dimensiones: 470x400x1050 mm | Peso: 20Kg**



# LASERLUZ

Aparatología estética al alcance de todos

Atención al cliente

900 902 792

[laserluz@laserluz.com](mailto:laserluz@laserluz.com)

[www.laserluz.com](http://www.laserluz.com)

 [@laserluzestetica](https://www.instagram.com/laserluzestetica)

 [Laserluz Technology](https://www.facebook.com/LaserluzTechnology)

C/ Alpedrete, 19 - P.I. Ventorro del Cano - 28925 Alcorcón (Madrid)